

Istruzione Mascherina FFP2

Modello: DK033D

Conforme allo Standard: EN 149:2001+A1:2009

Marchiato CE 1463

Descrizione generale del respiratore FFP2

Questa mascherina protettiva aiuta a proteggere l'apparato respiratorio da fumi, polveri, particolato, aerosol, batteri, virus, etc, e filtra fino al 95% delle sostanze nocive.



Perché utilizzare le mascherine protettive FFP2?

- Protezione FFP2 contro agenti contaminanti pericolosi
- Protegge te stesso e gli altri
- Il design consente maggiori movimenti facciali, con una migliore adattabilità e regolazione
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del volto per una perfetta aderenza
- Deve essere indossata adattandola alla conformazione di naso, guance e mento rendendola il più aderente possibile.

Questa mascherina è da considerarsi monouso. È progettata per uso continuativo fino ad un massimo di 8-12 ore.

Come indossare mascherina FFP2


Dopo aver aperto la confezione, aprire la mascherina, appoggiarla sul viso davanti a naso e bocca e utilizzare gli elastici per il fissaggio sul capo.

Con le dita, far aderire i contorni del respiratore alle curve del naso, utilizzando la lamina stringinaso, che deve essere sagomata sul dosso del naso per renderla aderente.


Premere con le mani per far aderire nel miglior modo possibile i bordi della mascherina ai contorni del viso.

Istruzioni per l'uso di mascherine chirurgiche e respiratori filtranti

Prima di indossare la mascherina è consigliabile lavarsi le mani

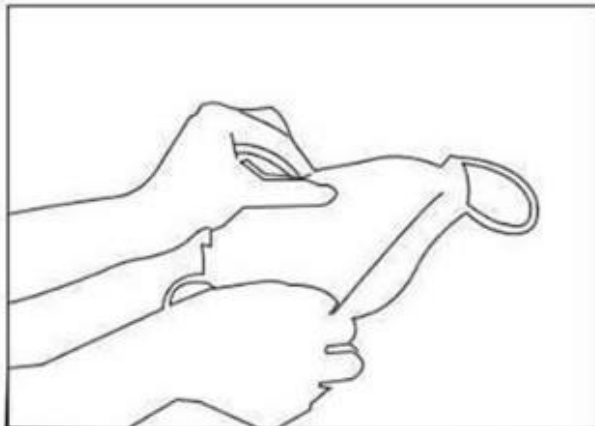

Aprire la mascherina.

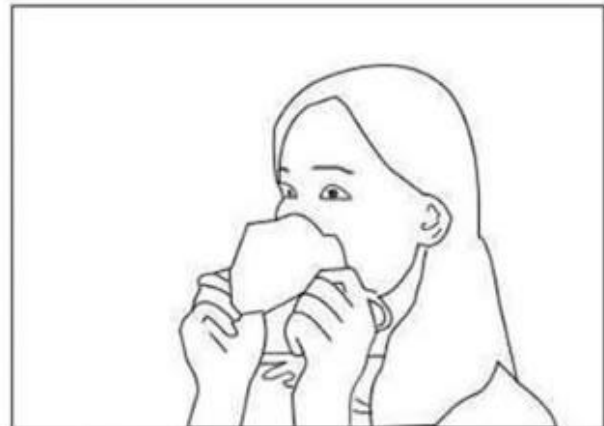

Indossare la mascherina appoggiandola prima sul naso



Agganciare gli elastici dietro alle orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni



Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile anche sulle guance e sotto il mento

Rimuovere la mascherina evitando il contatto con la parte interna.